

Shipping Instructions

Collect the sample according to the instructions provided with the collection device and then follow the instructions below to return the collected sample:

- 1- Place the tube containing the collected specimen inside the **Biohazard Specimen Bag** (Do not remove the absorbent pad).
- 2- Remove air from inside the bag, remove the adhesive strip and seal properly.
- 3- Place the sealed Biohazard Specimen Bag (containing the sample) inside the **Bubble Envelop** labelled as **“Exempt Human Specimen”**.
- 4- Seal the Bubble Envelop properly.
- 5- Ship the envelop using any postal service.

www.norgenbiotek.com

Toll Free: 1 866 667 4362

Phone: 905-227-8848

Fax: 905 227 1061

Tech support: techsupport@norgenbiotek.com

Orders: orders@norgenbiotek.com

ISO 9001:2008 and 13485:2003 Certified

NORGEN
BIOTEK  CORP.

Product of CANADA

UI38300-1

Instructions d'Expédition

Collectionner l'échantillon selon les instructions fournis avec l'appareil de collection et suivez les instructions ci-dessous afin to retourner l'échantillon collectionnée :

- 1- Placer le tube contenant l'échantillon dans le **sac de Biohazard** (Ne pas enlever le papier absorbant).
- 2- Enlever l'air de l'intérieur du sac, retirer la bande adhésive et cacheter correctement.
- 3- Placer le sac de Biohazard scellé (contenant l'échantillon) dans l'**enveloppe à bulle** étiqueté «**Exempt Human Specimen**» (Spécimen Humain Exempté).
- 4- Bien sceller l'enveloppe à bulle.
- 5- Envoyer l'enveloppe par la poste.

www.norgenbiotek.com

Sans Frais: 1 866 667 4362

Téléphone: 905-227-8848

Fax: 905 227 1061

Support technique: techsupport@norgenbiotek.com

Commandes: orders@norgenbiotek.com

Certifié ISO 9001:2008 et 13485:2003

NORGEN
BIOTEK  CORP.

Produit au CANADA

UI38300-1